

Patienteninformation

Messung der Darmtransitzeit mit Transit-Pelletsmethod™

Bitte lesen Sie die Informationen in diesem Beipackzettel sorgfältig durch, bevor Sie Transit-Pellets™ zum ersten Mal verwenden. Er enthält wichtige Informationen für Sie.

Verwenden Sie Transit-Pellets™ genauso, wie in dieser Patienteninformation beschrieben oder nach Anweisung Ihres Arztes oder Radiologen. Bewahren Sie diese Information gut auf, da Sie sie vielleicht noch einmal benötigen.

- Fragen Sie Ihren Arzt oder Radiologen, falls Sie zusätzliche Informationen oder Rat benötigen
- Informieren Sie Ihren Arzt vor der Untersuchung über mögliche Allergien
- Falls sich Ihre Schmerzen im Magen-Darm-Trakt während der Einnahme der Kapseln verschlimmern, sollten Sie Ihren Arzt aufsuchen
- Dieser Test ist nicht zu empfehlen, wenn Sie schwanger sind oder wahrscheinlich schwanger sind, da die Röntgenstrahlung Ihrem ungeborenen Kind Schaden zufügen kann.

In dieser Patienteninformation erhalten Sie Informationen darüber:

- 1) Was Transit-Pellets™ sind und wofür sie verwendet werden
- 2) Wie Transit-Pellets™ anzuwenden sind
- 3) Wie Transit-Pellets™ sicher aufbewahrt werden
- 4) Inhaltsstoffe

1) Was sind Transit-Pellets™ und wofür werden sie verwendet:

Transit-Pelletsmethod™ misst, wie lange es dauert, bis die zu sich genommene Nahrung den Darmtrakt durchläuft und ermöglicht so Ihrem Arzt, zu sehen, ob Ihre Durchlaufzeit langsam, schnell oder normal ist. Es ist ein wichtiges Diagnose-Tool in der klinischen Gastroenterologie. Die Methode wird dazu genutzt, um ein besseres Verständnis der Magen-Darm-Probleme eines Patienten zu erhalten und bietet somit die Grundlage für die weitere Behandlung.

Die umfassendste Anwendung dieser Messung ist die Untersuchung und Diagnose schwerer Verstopfungen. Die Messung kann auch in Fällen chronischer Durchfallerkrankungen angewendet werden, um zu erkennen, ob die Krankheit auf eine ungewöhnlich schnelle Darmdurchlaufzeit zurückzuführen ist oder ob diese normal ist.

2) Anleitung:


Die nachfolgende Tabelle zeigt Ihnen, wann Sie Ihre Kapseln einnehmen sollten (falls Ihnen dies nicht bereits in Ihrem Terminalschein mitgeteilt wurde), wobei die Angaben auf den Daten und Uhrzeiten Ihres Röntgentermins basieren:

Beachten Sie! Nur ein Beispiel	Tag 1	Tag 2	Tag 3	Tag 4	Tag 5	Tag 6	Tag 6	Tag 7
Datum Uhrzeit	26. Mai 10 Uhr	27. Mai 10 Uhr	28. Mai 10 Uhr	29. Mai 10 Uhr	30. Mai 10 Uhr	31. Mai 10 Uhr	31. Mai 10 Uhr	1. Juni 10 Uhr
Zeit vor Röntgen	6 Tage	5 Tage	4 Tage	3 Tage	2 Tage	24 Stunden	12 Stunden	Röntgen

Bei Fragen sollten Sie bitte Kontakt mit der Radiologie-Abteilung aufnehmen.

In der Schachtel finden Sie eine Blisterpackung mit sieben (7) Kapseln. Sie sind mit den Nummern 1 bis 6 markiert (siehe Darstellung rechts). Jede Nummer steht für einen Tag in der vorherigen Tabelle.

Schlucken Sie die Kapseln mit Wasser entsprechend der auf der Rückseite der Blisterpackung angegebenen Nummer herunter. Eine Kapsel am Tag in den ersten fünf (5) Tagen. Am Tag sechs müssen zwei (2) Kapseln in einem zwölf (12)-stündigen Dosierungsintervall geschluckt werden. Stellen Sie sicher, dass Sie die Zeitangaben auf dem Plan genau einhalten.

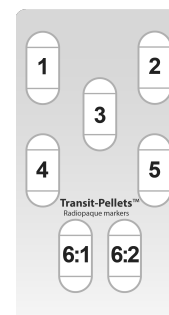

2) Fortsetzung der Anleitung:

Die Kapsel sollte als Ganzes heruntergeschluckt werden; sollten Sie aber Schwierigkeiten dabei haben, so können Sie sie weglegen und einfach die Marker schlucken. Haben Sie Schwierigkeiten, die Kapsel oder die Marker zu schlucken, so versuchen Sie die Kapsel oder die Marker anstatt mit Wasser zum Beispiel mit Apfelmuss oder Joghurt einzunehmen. Die dickere Konsistenz einer weicheren Substanz kann das Schlucken einfacher machen.

Die Kapsel löst sich auf und die kleinen Marker werden wie Stücke vom Essen durch Ihren Darmtrakt und durch Ihren Darm wandern. Die Marker kommen mit Ihrem Stuhl heraus und sind nicht schädlich für Sie.

Weichen Sie nicht von Ihrer üblichen Ernährung (Essen oder Trinken) ab.

Während der Dauer der Untersuchung dürfen Sie KEINE Abführmittel zu sich nehmen oder auf andere Weise dafür sorgen, dass Ihr Darm sich entleert.

Es gibt viele Faktoren, z.B. Ernährung und Einnahme von Medikamenten, die das Ergebnis beeinflussen können. Informieren Sie bitte Ihren Arzt vor der Einnahme der Kapseln über alle Medikamente, die Sie nehmen. Er wird Ihnen raten, ob Sie die Einnahme anderer Medikamente vorübergehend einstellen müssen.

Falls Sie zu viele oder die falschen Kapseln eingenommen haben oder wenn Sie eine Kapsel vergessen haben oder sie zur falschen Zeit eingenommen haben, sollten Sie die Radiologie-Abteilung umgehend um Rat fragen.

3) Wie können Transit-Pellets™ sicher aufbewahrt werden:

Nicht über 25°C (77°F) lagern

Transit-Pellets™ außerhalb der Sicht- und Reichweite von Kindern aufbewahren

4) Angabe der Inhaltsstoffe:

Kapseln: Hypromellose Methylcellulose E464

Marker: Elastosil® R401/60 Silikonkautschuk (78%), Bariumsulfat BaSO₄ Pulver EMPROVE (22%)

Eigentümer und Genehmigung für den Verkauf:

Anschrift: Medifactia AB Lumaparksvägen 7, SE 120 31 Stockholm, SWEDEN

Besuchs- und Lieferadresse: Medifactia AB Ljusslingan 4, 8tr., SE 120 30 Stockholm, SWEDEN

Telefon: +46 (0)8- 460 072 06

Weitere Informationen über Transit-Pellets™ finden Sie auf www.medifactia.com

 Batch

 Verwenden bis

 Herstellung

 Gebrauchsanweisung lesen